

SMARTA INSULIN-PENNOR

NovoPen® och NovoPen Echo® Plus

Hur man använder NovoPen med Glooko®

1. ÖVERFÖRA DATA

- Se till att din Glooko® Transmitter är igång och redo för dataöverföring.
- Se till att NovoPen®-enhetens doseringsknapp är helt intryckt och att doseringsräknaren är nollställd.
- Placera den smarta insulinpennan i ringen ovanpå Glooko® Transmitter. Överföringen startar automatiskt.
- Överföringen är klar när displayen är grön.
- Logga in på ditt Glooko®-konto för att granska uppgifterna.



2. ANSLUT A-PENNAN TILL PATIENTEN

- Välj ditt valda NovoPen® serie nummer 'Tilldela enheter' -fliken.
- Pennorna identifieras via sina serie nummer. Pennans nummer kan ses när doseringsknappen är helt utdragen (se bild).
- Serienumret börjar alltid med PEN och endast siffrorna efter PEN visas i Glooko®.

glooko Namn Ange ett patientnamn Demo account UK team ProConnect kod: uktxdemo MW

Tilldela enheter Visa patienter Academy™

Terminal Enhetstyp
Filtrera efter CGM, Meter, Insulin. Uppdatera lista

Enhetstyp Senaste synkronisering Tilldelning

Ej tilldelade
Inga enheter att tilldela

Nyligen tilldelade
Inga enheter tilldelade under de senaste 24 timmarna

PEN Serienummer

3. VÄLJ INSULIN

När en penna registrerats måste pennans insulin anges. Varje patient kan registrera upp till fyra pennor.

glooko Namn Ange ett patientnamn Demo account UK team ProConnect kod: uktxdemo MW

Tilldela enheter Visa patienter Academy™

Filtrera efter 51909095 Uppdatera lista

Enhetstyp

Ej tilldelade

Novopen Insulinpenna | AARDx Tilldela

Novopen Insulinpenna | AARDx Tilldela

Novopen Insulinpenna | AARDx Tilldela

Novopen Insulinpenna | AARDx Tilldela

Novopen Insulinpenna | AARDx Tilldela

Bekräfta insulintyp

Kontrollera insulinkassetten på insulinpennan för att ta reda på insulinmätet.

Tresiba

Fiasp

Novorapid

Actrapid

NovoMix3D

Insulatard


Start

EXEMPEL PÅ PENNDATA

i Glooko®

Dagsöversikt:

Se insulinpennans doseringsdata och glukosdata i samma displayfönster.

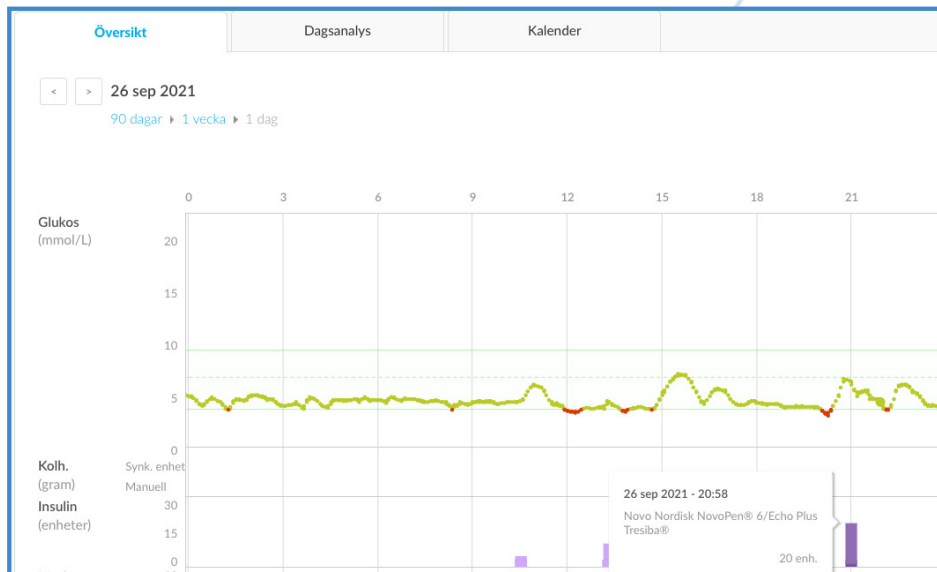

Veckoöversikt:

Se dagliga andelar av olika insulintyper över tid.



Kalendervy:

Spotmönster med sammanhangsbaserade vyer som visar hur kolhydrater och insulin korrelerar med glukosnivåer.

