

SMARTE INSULINPENNE: NovoPen® og NovoPen Echo® Plus Anvendelse sammen med Glooko®


1. OVERFØR DATA

- Sørg for, at din Glooko® Transmitter er tilsluttet strømmen og klar til at overføre.
- Sørg for, at NovoPen®-enhedens doseringsknap er trykket helt ned, og at doseringstælleren er på nul.
- Placer den smarte insulinpen i ringen øverst på Glooko® Transmitter. Overførslen starter automatisk.
- Overførslen er afsluttet, når displayet er grønt.
- Log på din Glooko®-konto for at gennemse data.




2. FORBIND EN PEN TIL EN PATIENT

- Vælg serienummeret på den valgte NovoPen® under fanebladet 'Tildel enheder'.
- Pennene kan identificeres via deres serie numre. Nummeret på pennen er synligt, når doseringsknappen er trukket helt ud (se billedet).
- Serienummeret starter altid med PEN, og det er kun de efterfølgende numre, der bliver vist i Glooko®.

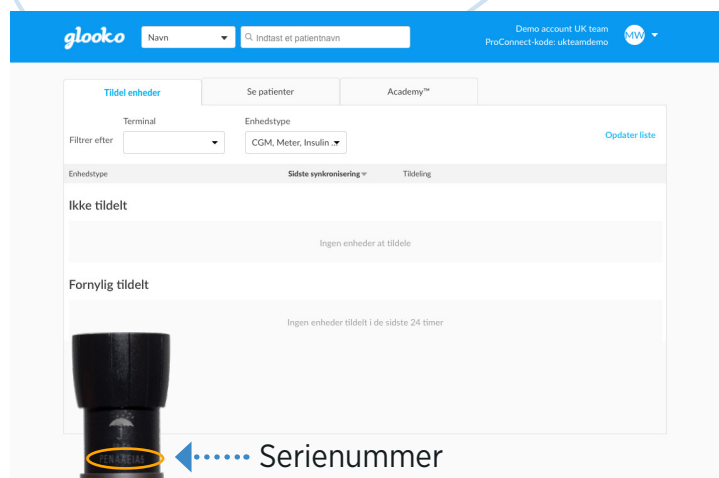

3. VÆLG INSULIN

Den insulin, der anvendes i pennen, skal angives, når en pen bliver registreret. Den enkelte patient kan registrere op til fire penne.

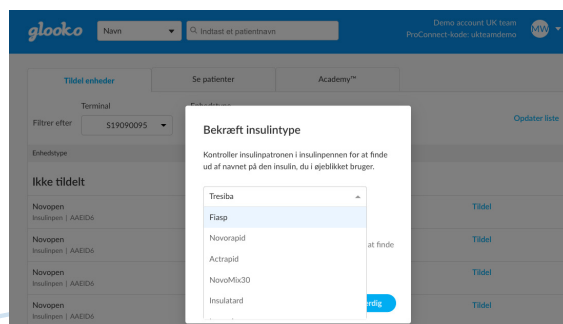


EKSEMPLER PÅ PENNEDATA

i Glooko®


Dagligt overblik:

Se insulinpennens doseringsdata og blodsukkerdata i det samme visningsvindue.

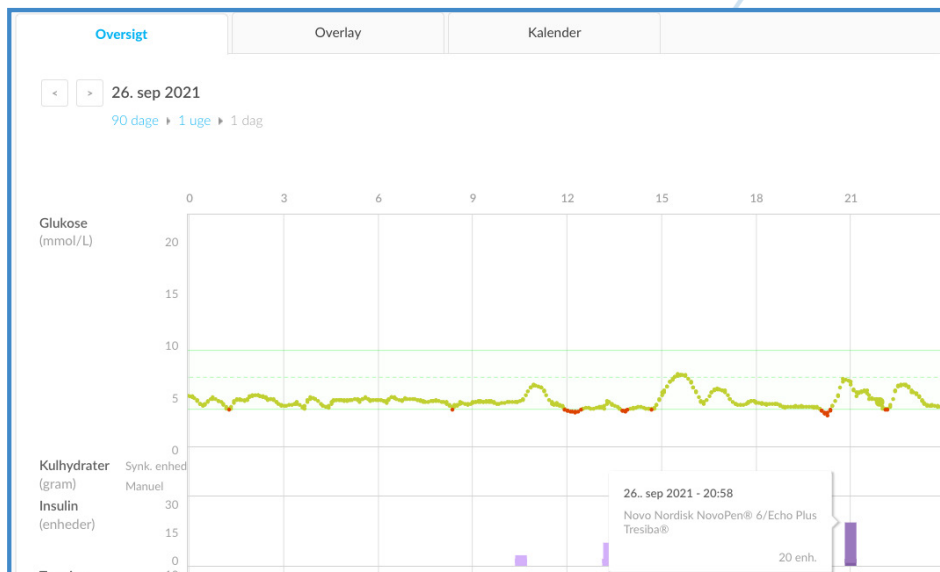

Ugentligt overblik:

Se den daglige fordeling af forskellige typer insulin over tid.

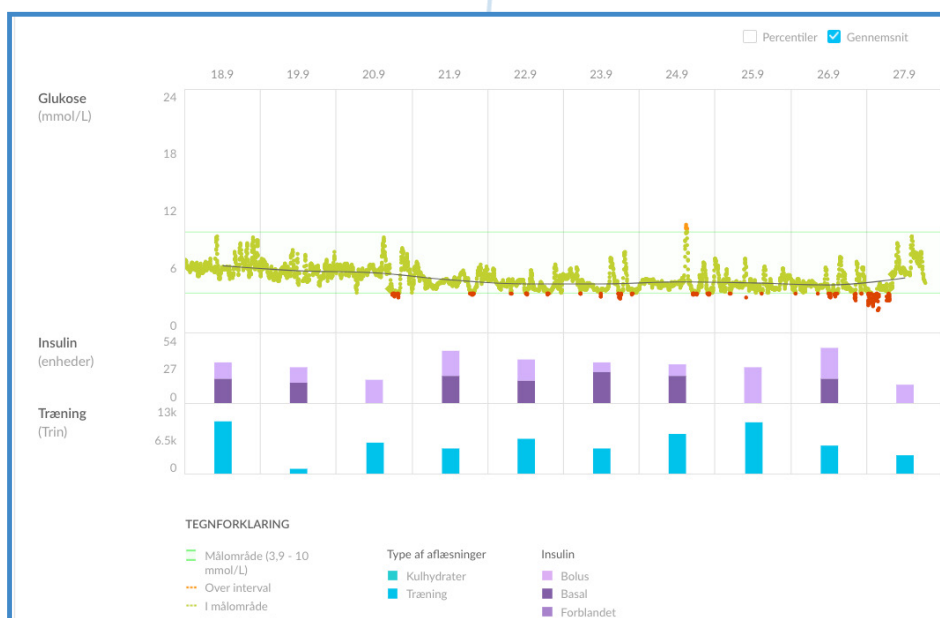

Kalendervisning:

Identificer mønstre ved hjælp af kontekstvisninger, der viser, hvordan kalorier og insulin påvirker blodsukkerniveauet.

