

ÄLYKKÄÄT INSULIINIKYNÄT: NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus Kuinka niitä käytetään Glooko®-lähettimen kanssa


1. TIETOJEN LÄHETTÄMINEN

- Varmista, että Glooko® Transmitter on päällä ja valmiina lähettämään.
- Tarkista, että NovoPen®-insuliinikynän annospainike on täysin alhaalla ja annoslaskuri nollassa.
- Aseta älykäs insuliinikynä Glooko® Transmitter -lähettimen päällä olevaan renkaaseen. Lataus alkaa automaattisesti.
- Lähetys on valmis kun näyttö on vihreä.
- Kirjautu Glooko®-tilillesi katsellaksesi tietoja.




2. YHDISTÄ ÄLYKYNÄ POTILAASEEN

- Valitse halutun NovoPen®-kynän sarja numero ”Määritä laitteet” -välilehdellä.
- Kynät tunnistetaan sarja numeroiden avulla. Kynän numero on näkyvässä, kun annospainike on kierretty kokonaan ulos (katso kuva).
- Sarjanumeron alussa lukee aina PEN ja vain numerot PEN-tekstin jälkeen näkyvät Glooko®-sovelluksessa

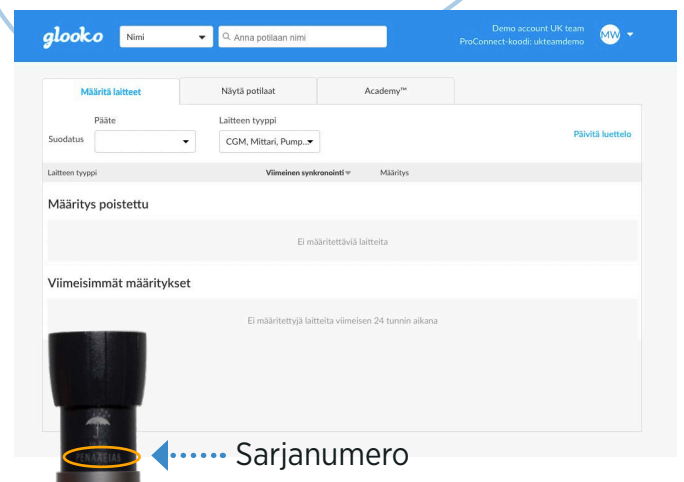

3. VALITSE INSULIINI

Kynän rekisteröinnin jälkeen on määritettävä kynässä käytetty insuliini. Jokaiselle potilaalle voidaan rekisteröidä enintään neljä kynää.

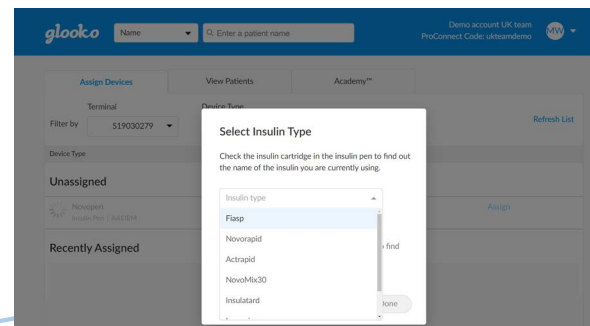

ESIMERKKEJÄ KYNÄN TIEDOISTA

Glooko®-sovelluksessa

Päivittäinen yleiskatsaus:

Voit katsella insuliinikynän annostietoja ja glukoositietoja samassa ikkunassa.



Viikkokatsaus:

Katsele eri tyyppisten insuliinien päivittäisiä osuuksia ajan kuluessa.



Kalenterinäkömä:

Havaitse glukoosimallit kontekstinäkymistä, jotka ilmaisevat, miten hiilihydraatit ja insuliini korreloivat glukoositasojen kanssa.



NovoPen® 6, NovoPen Echo®, Tresiba® ja Fiasp® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Novo Nordisk AS. NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita (0123). Valmistaja: Novo Nordisk



Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
United States



Glooko AB
Nellieckevägen 20
SE 412 63 Göteborg
Sweden

