

SMART INSULIN PENS: NovoPen® und NovoPen Echo® Verwendung mit Glooko®

1. DATEN HOCHLADEN

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Glooko® Transmitter eingeschaltet und zum Hochladen bereit ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Dosierknopf des NovoPen®-Geräts vollständig gedrückt ist und die Dosisanzeige auf Null steht.
- Stellen Sie den Smart Insulin Pen in den Ring oben auf dem Glooko® Transmitter. Das Hochladen startet automatisch.
- Das Hochladen ist abgeschlossen, wenn die Anzeige grün ist.
- Melden Sie sich bei Ihrem Glooko®-Konto an, um die Daten zu überprüfen.



2. EINEN PEN EINEM PATIENTEN ZUWEISEN

- Wählen Sie die gewünschte NovoPen®-Seriennummer auf der Registerkarte "Geräte zuordnen".
- Die Pens werden anhand ihrer Seriennummer identifiziert. Die Nummer auf dem Pen ist sichtbar, wenn der Dosierknopf vollständig herausgezogen ist (siehe Abbildung).
- Die Seriennummer beginnt immer mit PEN und in Glooko® werden nur die Zahlen nach PEN angezeigt.

glooko Name Demo account UK team ProConnect-Code: uktsandemo MW

Geräte zuordnen Patienten anzeigen Academy™

Terminal Geräteart Liste aktualisieren

Filtern nach Letzte Synchronisierung Zuordnung

Nicht zugeordnet

Keine zuzuordnenden Geräte

Kürzlich zugeordnet

In den letzten 24 Stunden wurden keine Geräte zugeordnet.

PEN12345 ← Seriennummer

3. INSULIN AUSWÄHLEN

Bei der Registrierung eines Pens muss das im Pen verwendete Insulin angegeben werden. Jeder Patient kann bis zu vier Pens registrieren.

glooko Name Demo account UK team ProConnect-Code: uktsandemo MW

Geräte zuordnen Patienten anzeigen Academy™

Filtern nach Liste aktualisieren

Geräteart

Nicht zugeordnet

Novopen Insulin-Pen | AAEDK Zuordnen

Novopen Insulin-Pen | AAEDK Zuordnen

Novopen Insulin-Pen | AAEDK Zuordnen

Novopen Insulin-Pen | AAEDK Zuordnen

Insulin-Typ bestätigen

Überprüfen Sie die Insulinpatrone in Ihrem Insulin-Pen, um den Namen des gegenwärtig von Ihnen genommenen Insulins zu erfahren.

Tresiba

Flasp

Novorapid

Actrapid

NovoMix30

Insuletard

sollten? in Pen.


stellig

DATENBEISPIELE FÜR PENS

in Glooko®


Tägliche Übersicht:

Anzeige der Insulin Pen-Dosierungsdaten und Glukosedaten im selben Anzeigefenster.

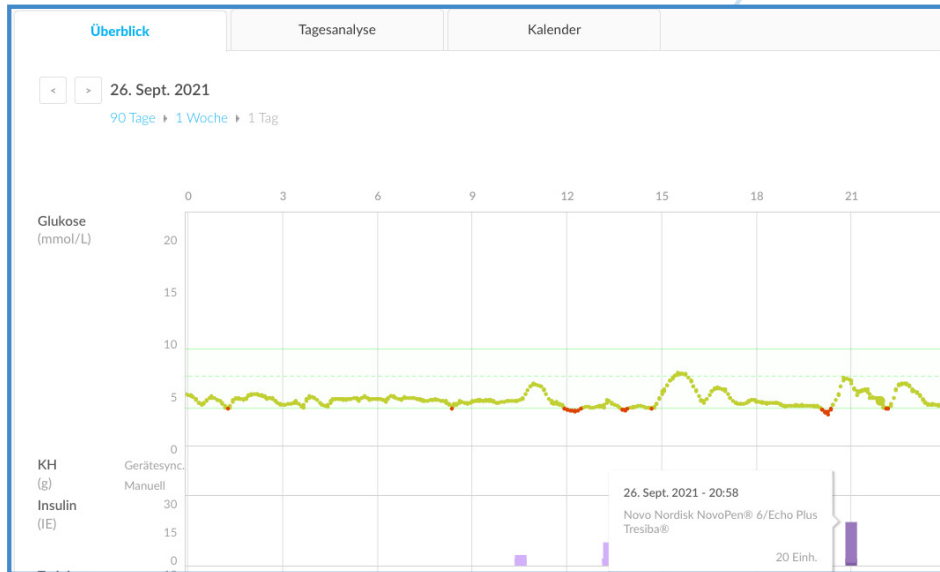

Wöchentliche Übersicht:

Anzeige des täglichen Anteils verschiedener Insulinarten im Laufe der Zeit.

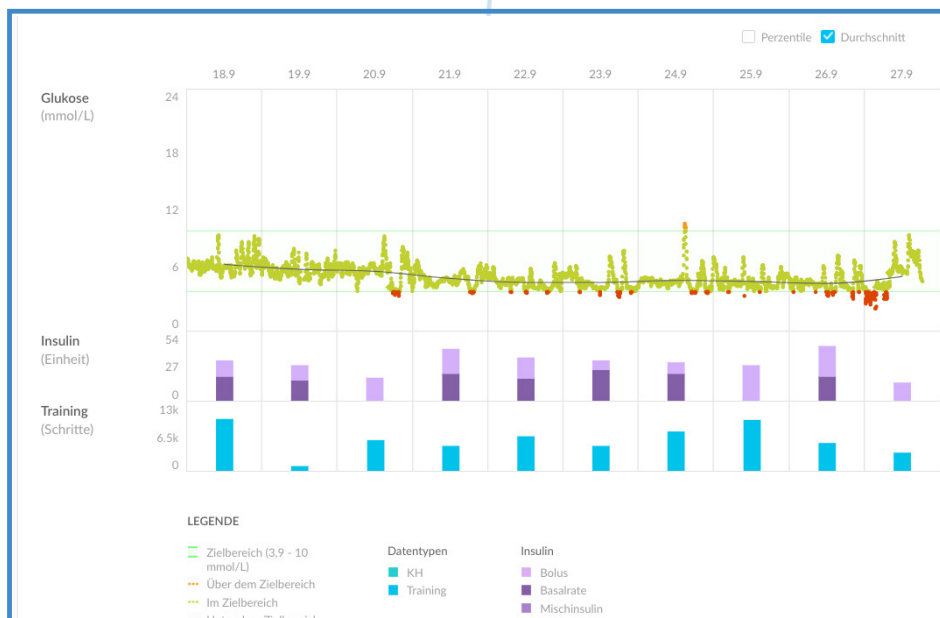

Kalenderansicht:

Darstellung von Mustern mit kontextbezogenen Ansichten, die zeigen, wie Kohlenhydrate und Insulin mit dem Glukosespiegel korrelieren.

