


SMARTE INSULINPENNE: NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus Overførsel af data med Glooko®


1. Du skal bruge en kompatibel smartphone med NFC-chip til at overføre data fra en smart insulinpen.

2. Start Glooko®-mobilappen, og log på. Appen er tilgængelig i [App Store](#) (iOS) og [Google Play](#) (Android).

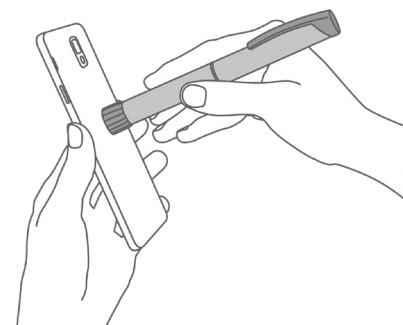


3. Sørg for, at pennens doseringsknap er trykket helt ind, og at doseringstælleren er på nul.

4.

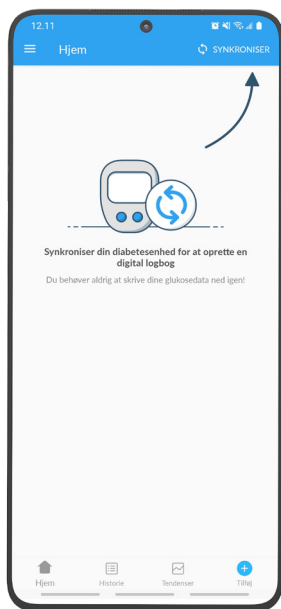


(ny Glooko-bruger)

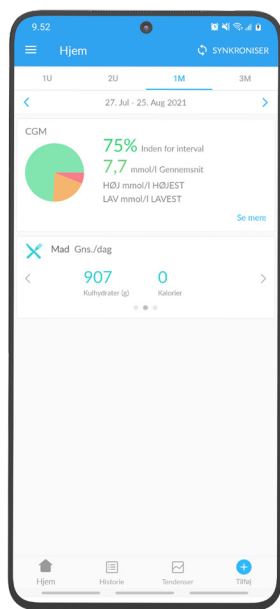


(eksisterende Glooko-bruger)

Klik på 'Synkroniser' på startfanebladet i øverste højre hjørne

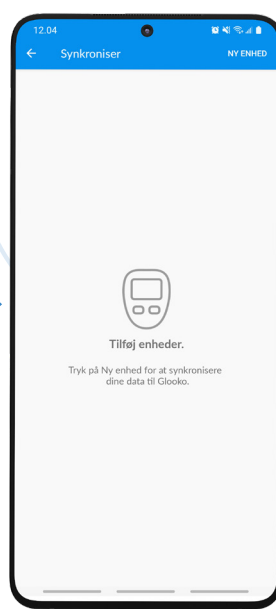

(første gang der oprettes forbindelse)

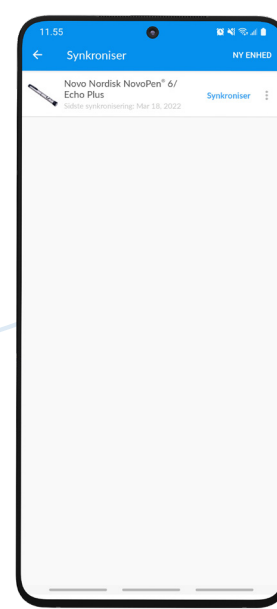

(efter forbindelse er oprettet)

Hvis du opretter forbindelse for første gang, skal du klikke på 'Ny enhed' i øverste højre hjørne og vælge 'Smart penne'. Hvis du allerede har forbundet din enhed, skal du vælge 'Synkroniser' ved siden af den enhed, du gerne vil overføre.

5. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte overførslen.

6. Efter korrekt overførsel kan du se dine insulindata i form af både diagrammer og rapporter.

SÅDAN FINDER DU NFC-CHIPPEN PÅ DIN TELEFON

NFC-chippen sidder normalt midt på telefonens bagside, men det kan variere alt efter model. Kontakt mobiltelefonproducenten, hvis der er problemer med at oprette forbindelse mellem pennen og telefonen, og for at finde ud af, hvor NFC-chippen sidder på din telefon.

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus er registrerede varemærker tilhørende Novo Nordisk.

glooko[®]
BETTER TOGETHER