


# STYLOS À INSULINE CONNECTÉS : NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus Comment télécharger des données dans Glooko®

1. Vous aurez besoin d'un smartphone compatible avec puce NFC pour télécharger les données à partir d'un stylo à insuline.
2. Démarrez l'application mobile Glooko® et connectez-vous. L'application est disponible sur [l'App Store](#) (iOS) et sur [Google Play](#) (Android).
3. Veillez à appuyer entièrement sur le bouton de dose du stylo et à ce que le compteur de dose soit à zéro.

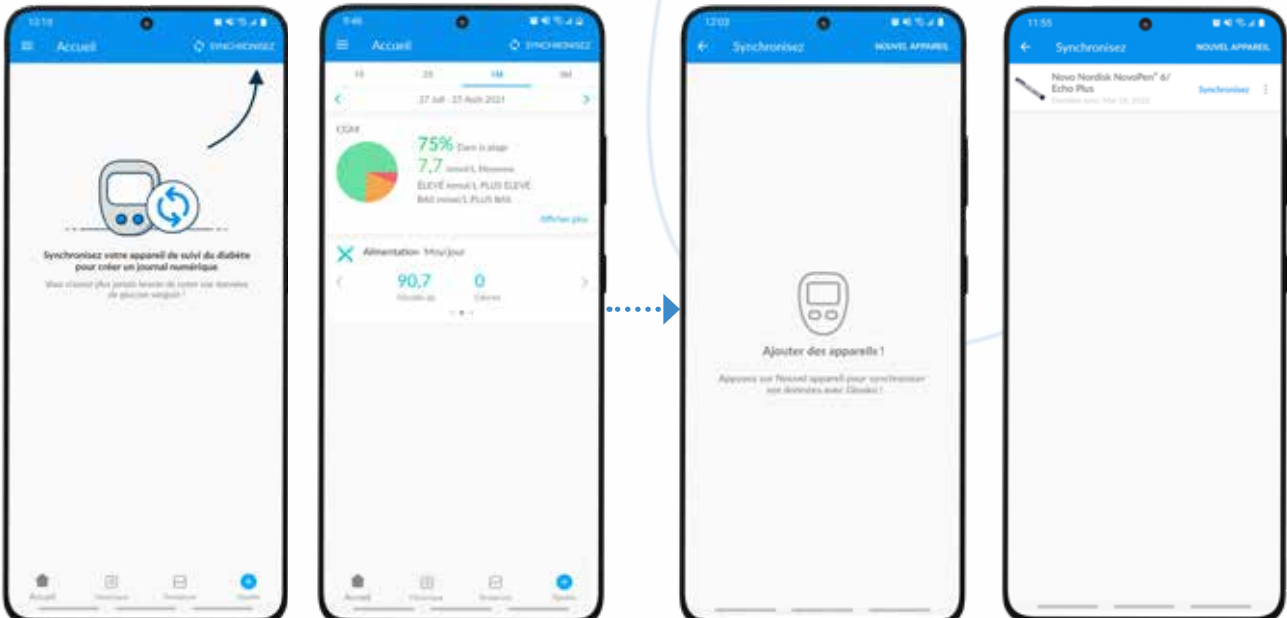

4. 

(nouvel utilisateur Glooko)      (utilisateur Glooko existant)      (première connexion de l'appareil)      (une fois l'appareil connecté)

Dans l'onglet Accueil, cliquez sur « Synchroniser » dans le coin supérieur droit.

Si vous connectez votre appareil pour la première fois, cliquez sur « Nouvel appareil » dans le coin droit et sélectionnez « Stylos connectés ». Si vous avez déjà connecté votre appareil, sélectionnez « Synchroniser » à côté de l'appareil à partir duquel vous souhaitez télécharger.

5. Suivez les instructions à l'écran pour compléter le téléchargement.
6. Après un téléchargement réussi, vous verrez vos données d'insuline dans divers graphiques et rapports.

## COMMENT LOCALISER LA PUCE NFC SUR VOTRE SMARTPHONE

L'emplacement de la puce NFC sur le smartphone varie selon le modèle. Consultez la notice de votre smartphone. Veuillez contacter le fabricant de votre smartphone en cas de problème de connectivité entre le stylo et celui-ci.