
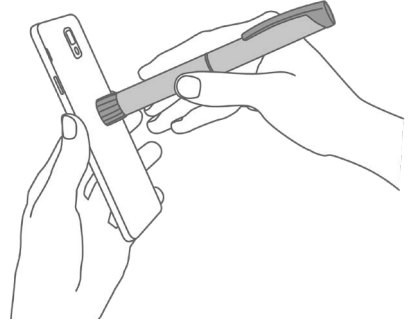


# ÄLYKKÄÄT INSULIINIKYNÄT: NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus Kuinka Glooko®-sovellukseen lähetetään tietoja

1. Lähettääksesi tietoja älykkäästä insuliinikynästä tarvitset älypuhelimien, jossa on NFC-siru.
2. Käynnistä Glooko® Mobile App ja kirjaudu sisään. Sovellus on saatavilla [App Storesta](#) (iOS) ja [Google Play](#) -kaupasta (Android).
3. Varmista, että kynän annospainike on kokonaan alhaalla ja että annoslaskuri on nollassa.

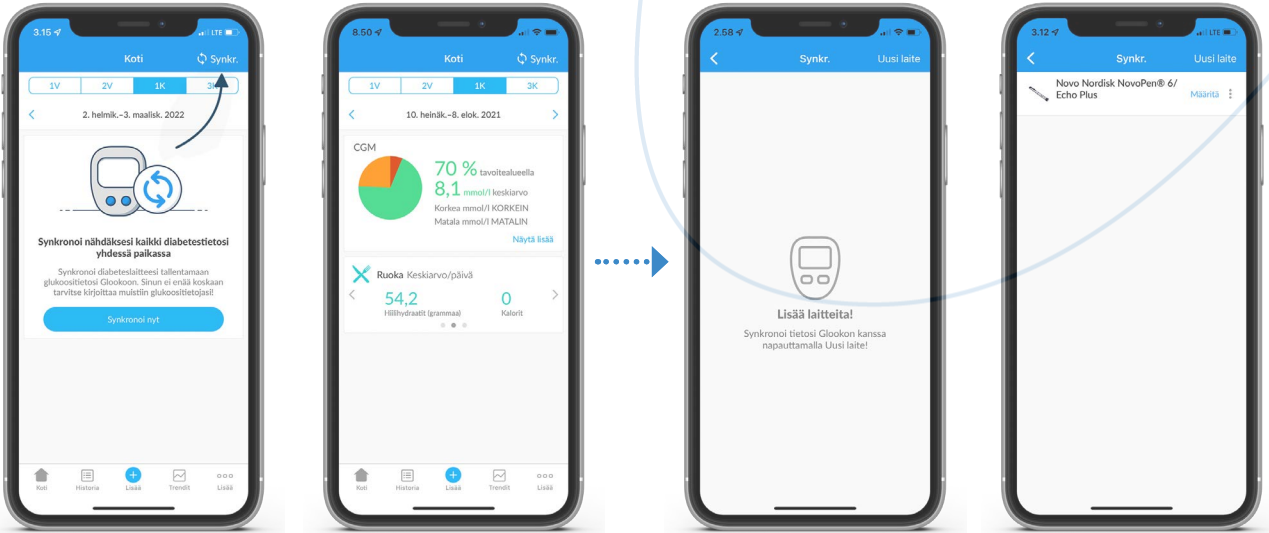

4. 

(uusi Glooko-käyttäjä)      (vanha Glooko-käyttäjä)      (laite yhdistetään ensimmäisen kerran)      (laite on jo yhdistetty)

Napsauta Koti-välilehdellä kohtaa "Synkronoi" oikeasta yläkulmasta.

Jos olet yhdistämässä laitettasi ensimmäistä kertaa, napsauta oikeasta yläkulmasta "Uusi laite" ja valitse "Älykynät". Jos olet jo yhdistänyt laitteesi, valitse kohta "Synkronoi" sen laitteen vierestä, jonka tiedot haluat lähettää.

5. Viimeistele lähetyksen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
6. Kun lähetyksen onnistui, voit katsella insuliinitietojasi useista eri kaavioista ja raporteista.

## KUINKA LÖYDÄT PUHELIMESI NFC-SIRUN

Yleensä NFC-siru on asennettu puhelimen taakse keskelle, mutta paikka voi vaihdella puhelinmallista riippuen. Ota yhteyttä matkapuhelimen valmistajaan, jos kynän ja puhelimen välillä on yhdistettävyysongelmia ja selvittääksesi, missä oman puhelimesi NFC-siru sijaitsee.

NovoPen® 6 ja Novo Pen Echo® Plus ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Novo Nordisk AS.  
NovoPen® 6 ja NovoPen Echo® Plus ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita (0123). Valmistaja: Novo Nordisk



  
Glooko Inc.  
411 High Street  
Palo Alto, CA 94041  
United States

  
Glooko AB  
Nellieckevägen 20  
SE 412 63 Göteborg  
Sweden

  
BETTER TOGETHER