

STYLOS À INSULINE CONNECTÉS : NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus Comment les utiliser avec Glooko®


1. TÉLÉCHARGER LES DONNÉES

- Veillez à ce que votre Transmetteur Glooko® soit allumé et prêt au téléchargement.
- Appuyez sur le bouton de dose des stylos NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus jusqu'à ce que le compteur de dose indique zéro.
- Placez le stylo à insuline connecté dans l'anneau sur le dessus du Transmetteur Glooko®. Le téléchargement commence automatiquement.
- Le téléchargement est terminé quand l'affichage est vert.
- Connectez-vous à votre compte Glooko® pour consulter les données.




2. ATTRIBUER UN STYLO AU PATIENT

- Sélectionnez le numéro de série du stylo connecté choisi dans l'onglet « Attribuer les dispositifs ».
- Les stylos sont identifiés par leurs numéros de série. Le numéro sur le stylo peut être vu quand le bouton de dose est entièrement sorti (voir l'image).
- Le numéro de série commence toujours par PEN. Seuls les numéros après PEN sont affichés dans Glooko®.

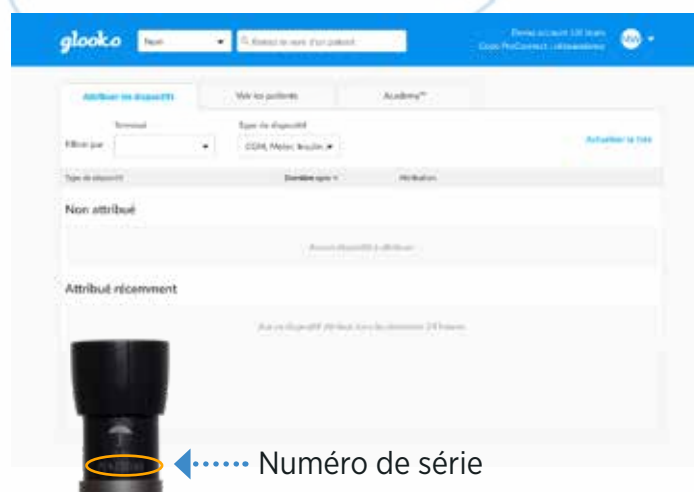

3. SÉLECTIONNER LE TYPE D'INSULINE

Quand un stylo est enregistré, le type d'insuline utilisée dans le stylo doit être spécifiée. Chaque patient peut enregistrer jusqu'à quatre stylos.

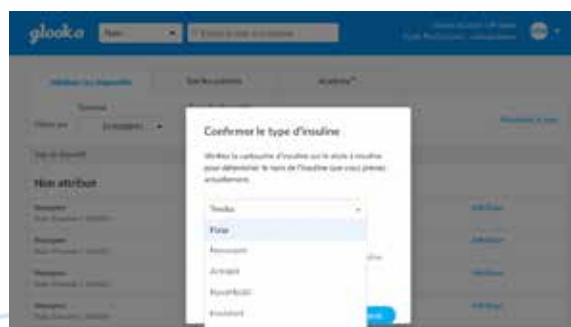


EXEMPLES DE DONNÉES DES STYLOS CONNECTÉS

dans Glooko®

Vue d'ensemble quotidienne :

voir les données de dose des stylos connectés et les données de glucose dans la même fenêtre d'affichage.

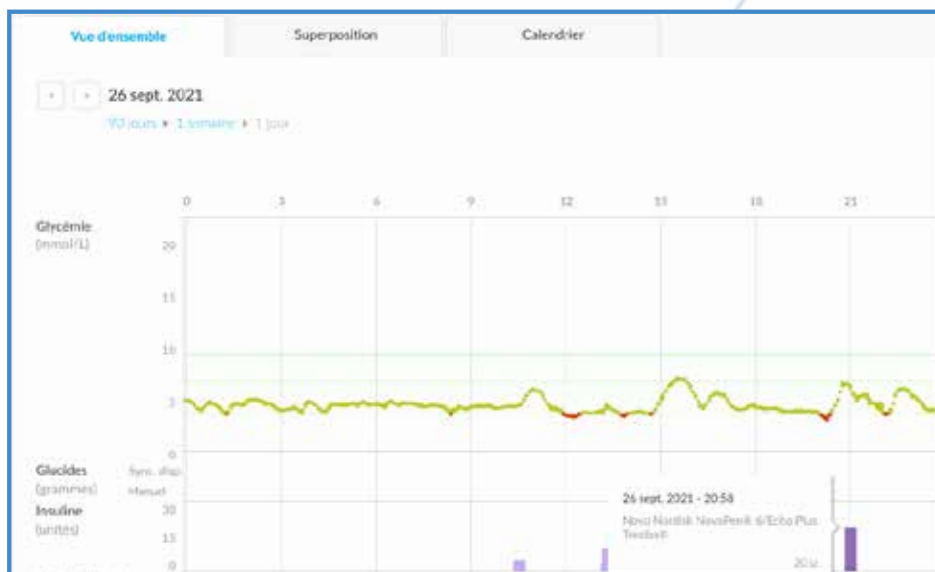

Vue d'ensemble hebdomadaire :

Voir le partage quotidien des différents types d'insuline au fil du temps.



Vue calendrier :

identifier les modèles à l'aide de vues contextuelles pour voir comment les glucides et l'insuline sont corrélés à la glycémie.

