



# Glooko<sup>®</sup> Uploader

Kullanım talimatları – Glooko kullanıcıları için

**glooko**<sup>®</sup>  
BETTER TOGETHER



# İçindekiler

Cihazınızı bulun .....	4-5
<b>Genel bilgiler .....</b>	<b>6</b>
Ürün açıklaması .....	6
Kullanım amacı .....	6
Desteklenen cihazlar.....	6
Uyarılar.....	6
Kontrendikasyonlar.....	6
<b>Kullanım talimatları .....</b>	<b>7</b>
Hastalar.....	8
<a href="https://my.glooko.com">https://my.glooko.com</a> adresinden MyGlooko Panelinizde oturum açın .....	8
Yazılım kurulum dosyasını indirin .....	8
Kurulum dosyasını bulun ve çalıştırın .....	8
Sağlık çalışanları .....	9
Glooko Uploader yazılımını indirebileceğiniz bir bağlantı talep edin.....	9
Yazılım kurulum dosyasını indirin .....	9
Kurulum dosyasını bulun ve çalıştırın .....	9
Hastalar ve Sağlık çalışanları.....	10
Glooko Uploader yazılımını açın .....	10
Glooko hesabınızla oturum açın .....	10
Glooko Uploader'daki Özellikler.....	11
Diyabet verilerini yükleyin .....	12
Diyabet verilerini görüntüleyin .....	13
<b>Uyumlu cihazlar ve aktarım yöntemleri .....</b>	<b>14</b>

# Cihazınızı bulun



Şeker ölçüm cihazı










CGM






İnsülin pompası


## Abbott

 FreeStyle Freedom Lite.....	14
 FreeStyle InsuLinx .....	14
 FreeStyle Lite.....	14
 FreeStyle Optium Neo.....	14
 FreeStyle Precision Neo.....	14
 Precision Xtra .....	14
 Precision Xceed.....	14


## Acon Laboratories

 On Call® Express.....	14
 On Call® Express II.....	14
 On Call® Express Voice .....	14



## AgaMatrix

 WaveSense Jazz™.....	14
---	----






## Animas

 OneTouch Ping (meter) .....	14
---	----


















## Animas

 OneTouch Ping (pump).....	17
 Vibe .....	17

## Arkray

 GlucoCard Shine Connex .....	14
 GlucoCard Shine Express .....	14
 GlucoCard Shine XL .....	14
 ReliOn Premier Blu.....	14
 ReliOn Premier Classic.....	14
 ReliOn Premier Voice.....	14


## Ascensia (Bayer)

 Breeze 2 .....	15
 Contour.....	15
 Contour Care.....	15
 Contour Fit.....	15
 Contour Link .....	15
 Contour Next.....	15
 Contour Next (Bluetooth) .....	15
 Contour Next One.....	15
 Contour Plus .....	15
 Contour Plus One.....	15
 Contour next EZ .....	15
 Contour next Link.....	15
 Contour next Link 2.4 .....	15
 Contour next USB.....	15
 Contour TS.....	15
 Contour XT.....	15
 Contour USB.....	15






## Dexcom

 G4 Platinum.....	17
 G4 Platinum with Share.....	17
 G5.....	17
 Touchscreen Receiver (G5).....	17

## GlucoRx

 Nexus.....	15
 Q.....	15


## i-SENS

 alphacheck professional .....	15
 CareSens BGM/TEE2 .....	15
 CareSens N .....	15
 CareSens N POP.....	15
 CareSens N Voice.....	15


## Insulet

 Omnipod®.....	18
 Omnipod® Dash™ System .....	18


## Intuity

 POGO® Automatic™ ..... 15
---


## LifeScan

 OneTouch Select Plus ..... 15
OneTouch Ultra ..... 15
OneTouch Ultra2 ..... 15
OneTouch UltraEasy ..... 15
OneTouch UltraMini ..... 15
OneTouch Verio ..... 15
OneTouch Verio Flex ..... 15
OneTouch Verio IQ ..... 15
OneTouch Verio Reflect ..... 15
OneTouch Verio Sync ..... 15


## Medtronic

 630G ..... 18
640G ..... 18
670G ..... 18


## Menarini

 GlucoMen LX2 ..... 16
---

## Prodigy



 AutoCode ..... 16
---

## Roche


 Accu-Chek Active ..... 16
Accu-Chek Aviva Connect ..... 16
Accu-Chek Aviva Combo ..... 16
Accu-Chek Aviva Expert ..... 16
Accu-Chek Aviva Insight ..... 19
Accu-Chek Aviva Nano ..... 16
Accu-Chek Aviva Plus Black ..... 16
Accu-Chek Aviva Plus Silver ..... 16
Accu-Chek Compact Plus ..... 16
Accu-Chek Guide ..... 16
Accu-Chek Guide Me ..... 16
Accu-Chek Instant ..... 16

Accu-Chek Mobile (USB) ..... 16
Accu-Chek Nano ..... 16
Accu-Chek Performa ..... 16
Accu-Chek Performa Insight ..... 19
Accu-Chek Performa Nano ..... 16


## Roche

 Accu-Chek Aviva Insight ..... 19
 Accu-Chek Performa Insight ..... 19

## Sanofi

 BGStar ..... 16
---

## Tandem

 t:flex ..... 18
 t:slim ..... 18
t:slim G4 ..... 18
t:slim X2 ..... 18

## Trividia (Nipro)

 TRUE METRIX ..... 16
TRUE METRIX AIR ..... 16
TRUEresult ..... 16
TRUEyou mini ..... 16

# Genel bilgiler

## Ürün açıklaması

Glooko Uploader®, evde veya sağlık kurumlarında bireyler ya da sağlık uzmanları tarafından evde takip cihazlarından alınan ön tanımlı verileri bir sunucu veri tabanına aktarmak amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, bağımsız bir ürün olarak veya Glooko sistemiyle birlikte kullanılabilir.

## Kullanım Amacı

Glooko, etkili bir diyabet yönetim programı oluşturulmasına destek olmak amacıyla, diyabetli bireylerin ve sağlık uzmanlarının cihaz verilerini incelemesine, analiz etmesine ve değerlendirmesine yardımcı olmak üzere evde ve profesyonel ortamlarda kullanım için tasarlanan bir veri yönetim yazılımıdır. Glooko, uyumlu tıbbi cihazlara ve takip aletlerine bağlanarak kullanıcıların verilerini Glooko sistemine aktarmasına olanak tanır. Glooko, tedavi kararları sağlamak amacıyla veya profesyonel sağlık önerilerinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

## Desteklenen cihazlar

İlk olarak şunlara ihtiyacınız olacak:

1. Uyumlu bir kan şekeri ölçüm cihazı, insülin pompası veya sürekli şeker takip (CGM) cihazı;
2. İçerisinde aşağıdaki İşletim Sistemlerinden birinin bulunduğu bir PC veya Mac bilgisayar:
  - Windows 8.1 (32 bit ve 64 bit)
  - Windows 10 (32 bit ve 64 bit)
  - macOS 10.14: Mojave
  - macOS 10.15: Catalina
  - macOS 11.0: Big Sur
3. Glooko Uploader yazılımı;
4. Glooko hesabı ve
5. Desteklenen diyabet cihazıyla birlikte gönderilen eşitleme veya cihaz indirme kablosu.

## Dikkat!

Glooko, aktardığı verilerde ölçüm yapmaz, bu verilerle ilgili yorumda bulunmaz veya karar vermez. Ayrıca, otomatik tedavi kararları sunmak veya profesyonel kararların yerine kullanılmak amacıyla da tasarlanmamıştır. Tüm tıbbi teşhis ve tedaviler, yetkin bir sağlık uzmanının denetim ve gözetimi altında gerçekleştirilmelidir.

## Kontrendikasyonlar

Yok.

# Kullanım talimatları – Glooko Uploader

Glooko Uploader'ı kullanmak için bir Glooko hesabı oluřturmanız gerekir. Glooko Uploader kullanılarak yklenen veriler, Glooko giriř bilgilerinizle eriřebileceėiniz Glooko hesabınıza eřitlenir. Verilerinizin Glooko sunucusuna eřitlenmesi iin İnternet (WiFi veya hcresel veri aėı) gereklidir.

## Hastalar:

- Glooko Uploader'ı kurma ve Glooko Uploader'ı kullanarak veri ykleme konusunda bilgi almak iin sonraki sayfaya gz atın.



## Saėlık alıřanları:

- Glooko Uploader'ı kurma ve Glooko Uploader'ı kullanarak veri ykleme konusunda bilgi almak iin 9. sayfaya gz atın.



# Hastalar

MyGlooko Paneline erişmek ve Glooko Uploader yazılımını indirmek için Glooko hesabınızın olması gerekir. iOS ve Android cihazlarda Glooko mobil uygulamasını kullanarak Glooko'ya kaydolabilirsiniz. **Glooko Destek** (<https://support.glooko.com>) ile iletişime geçerek de hesap oluşturabilirsiniz. Glooko hesabınızı oluşturduktan sonra lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

## 1 <https://my.glooko.com> adresinden MyGlooko Panelinizde oturum açın

- E-posta Adresinizi ve Parolanızı girin.
- Oturum Aç seçeneğine dokununuz.


### GLOOKO HESABINIZLA OTURUM AÇMA KONUSUNDA YARDIM ALIN

- **PAROLAYI UNUTTUM:**  
Giriş yapmak için kullandığınız parolayı hatırlayamıyorsanız parola sıfırlama e-postasının tarafınıza iletilmesi için **Parolayı Unuttum** seçeneğine dokununuz. Ekrandaki talimatları izleyin. Yardım almak için Glooko Destek ile iletişime de geçebilirsiniz.
- **HESABINIZIN KİLİDİNİ AÇIN:**  
Parolanızı beş kere yanlış girerseniz hesabınız kilitlenir. Ardından otomatik olarak hesabınızın e-posta adresine kilit açma talimatlarının yer aldığı bir e-posta gönderilir. Bu e-posta size ulaşmadıysa **Kilit açma talimatlarını almadım** seçeneğine tıkladığınızda Kilit Açma sayfasına yönlendirilirsiniz. Ekrandaki talimatları izleyin. Yardım almak için Glooko Destek ile iletişime de geçebilirsiniz.

## 2 Yazılım kurulum dosyasını indirin

MyGlooko Panelinize giriş yaptıktan sonra, Kurulum Dosyasını indirmeniz gerekir.

- **Ayarlar** seçeneğine dokununuz.
- Sayfasının sonuna gidin ve **Glooko Uploader'ı AI** seçeneğine tıklayın.
- Açılan ekranda Glooko Uploader'ı bir Mac veya PC'ye kurmak için kullanacağınız düğmeleri göreceksiniz. Kurulum Dosyasını indirmek için Mac veya PC düğmelerinden birine basın.

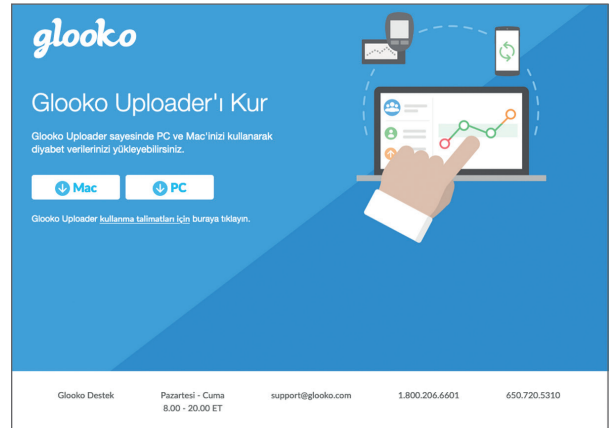

## 3 Kurulum dosyasını bulun ve çalıştırın

İnternet tarayıcısına ve işletim sistemine bağlı olarak indirilen kurulum dosyasını aramanız gerekebilir veya dosyayı çalıştırmamız için otomatik olarak bir pencere açılabilir.

- **PC** kullanıyorsanız Son İndirilenler klasörünüze bakın
- **Mac** kullanıyorsanız Finder'da indirilenler klasörüne bakın

Dosyayı bulduktan sonra dosyaya çift tıklayın ve ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin.

**NOT:** Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecektir.



# Sağlık çalışanları

Glooko Uploader yazılımını kullanmak için bir Glooko Provider hesabınızın ve Glooko Uploader'ı destekleyen bir aboneliğinizin olması gerekir. Ayrıca Glooko Uploader'ı indirme bağlantısına da ihtiyacınız olacaktır. Yardım almak için lütfen Glooko Destek (<https://support.glooko.com>) ile iletişime geçin.


## 1 Glooko Uploader yazılımını indirebileceğiniz bir bağlantı talep edin

Sağlık Çalışanlarının Glooko Uploader yazılımını indirebilecekleri bir bağlantı talep etmesi gerekir.

- Glooko Uploader yazılımını indirme bağlantısı talep etmek için lütfen Glooko Destek (<https://support.glooko.com>) ile iletişime geçin.

## 2 Yazılım kurulum dosyasını indirin

- Glooko'dan yazılımı indirmek için kullanacağınız bağlantı tarafınıza ulaştıktan sonra e-postanızdaki bağlantıya tıklayın. Açılan ekranda Glooko Uploader'ı bir Mac veya PC'ye kurmak için kullanacağınız düğmeleri göreceksiniz. Kurulum Dosyasını indirmek için Mac veya PC düğmelerinden birine basın.

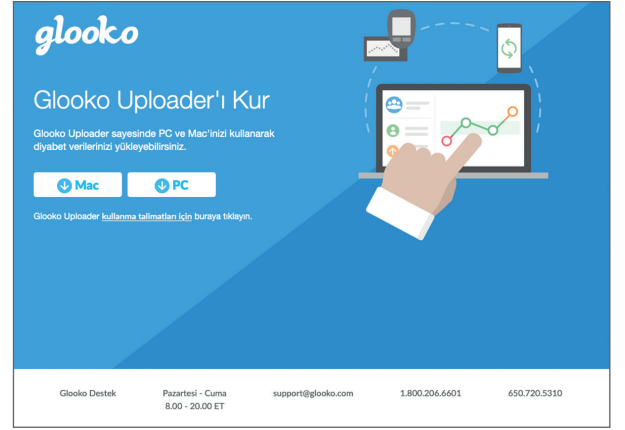

## 3 Kurulum dosyasını bulun ve çalıştırın

İnternet tarayıcısına ve işletim sistemine bağlı olarak indirilen kurulum dosyasını aramanız gerekebilir veya dosyayı çalıştırmamız için otomatik olarak bir pencere açılabilir.

- **PC** kullanıyorsanız Son İndirilenler klasörünüze bakın
- **Mac** kullanıyorsanız Finder'da indirilenler klasörüne bakın

Dosyayı bulduktan sonra dosyaya çift tıklayın ve ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin.

**NOT:** Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecektir.

# Hastalar ve Sağlık çalışanları

Glooko Uploader'ı kurduktan (Hastalar için Talimatlar; Sağlık Çalışanları için Talimatlar) ve bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra Masaüstünüzde bilgisayarınızda veya Uygulamalar klasörünüzde (Mac) Glooko Uploader simgesini bulun.

## 4 Glooko Uploader yazılımını açın

- Masaüstünüzde (PC) veya Uygulamalar Klasörünüzde (Mac) Glooko Uploader simgesini **bulun**.
- Programı başlatmak için Glooko Uploader simgesine **çift tıklayın**.

**NOT:** Glooko Uploader'ı ilk defa başlatmadan önce bilgisayarınızı yeniden başlattığınızdan emin olun.



## 5 Glooko hesabınızla oturum açın

Glooko Uploader programı açıldıktan sonra Glooko hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

- **E-postanızı veya Kullanıcı Adınızı girin**
- **Parolanızı girin**
- **Oturum Aç** seçeneğine dokununuz.


### GLOOKO HESABINIZLA OTURUM AÇMA KONUSUNDA YARDIM ALIN

Giriş yapmak için kullandığınız parolayı hatırlayamıyorsanız parola sıfırlama e-postasının tarafınıza iletilmesi için **Parolayı Unuttum** seçeneğine tıklayın. Yardım almak için Glooko Destek ile iletişime geçebilirsiniz.


# Hastalar ve Sağlık çalışanları

## 6 Glooko Uploader'daki Özellikler


### HESABINIZDAN ÇIKIŞ YAPIN


- Glooko Uploader'ın sağ alt köşesinde bulunan Profil düğmesine  dokunarak Glooko hesabınızdan çıkış yapabilirsiniz.
- Çıkış Yap** seçeneğine dokununuz

### PROFİL BİLGİLERİNİZİ GÖRÜNTÜLEYİN

- Glooko Uploader'ın sağ alt köşesinde bulunan Profil düğmesine  dokunarak profil bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
- Bu açılır pencerede şu bilgiler yer alır:
  - Adınız**
  - Birincil Yetkili Alanınız** (Sağlık Çalışanı) ve ilgili **ProConnect Kodunuz**
  - E-posta adresiniz**
- Çıkış Yap** seçeneğine dokununuz.

### GLOOKO UPLOADER HAKKINDA EK BİLGİ ALIN

- Glooko Uploader'ın sol alt köşesinde bulunan Bilgi düğmesine  dokunarak ek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
- Bu açılır pencerede ürün destek bilgileri, ürün tanımı ve Kullanım Amacı beyanı bulunur.

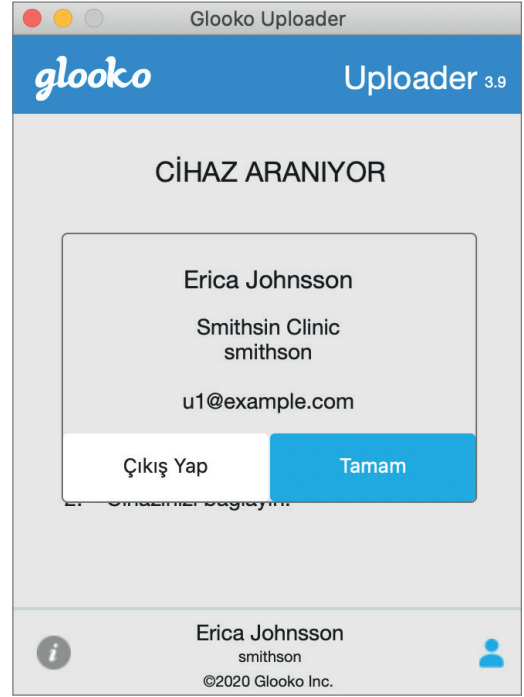

# Hastalar ve Sağlık çalışanları

## 7 Diyabet verilerini yükleyin

Glooko Uploader'a kaydolduktan sonra diyabet cihazı verilerinizi yükleyebilirsiniz.

### DİYABET CİHAZINIZIN KABLOSUNU BİLGİSAYARA BAĞLAYIN

Giriş yaptıktan sonra Glooko Uploader, cihaz aramaya başlayacaktır.

- Diyabet cihazı için uygun USB kablosunu veya kızılötesi kablosunu bilgisayara bağlayın.
- Kablo tanıdıktan sonra cihazınızı bağlamadan önce kablo sürücülerinin tanınması için birkaç saniye bekleyin.




### DİYABET CİHAZINI KABLOYA BAĞLAYIN

- Kabloyu bilgisayara bağladıktan sonra diyabet cihazını kabloya bağlayın.
- Buraya tıklayarak diyabet cihazınızdaki verileri yüklemek için hangi kabloya ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz.

**NOT:** Diyabet cihazınızla birlikte gönderilen kabloyu kullandığınızdan emin olun. Yeni bir kablo edinmeniz gerekiyorsa lütfen diyabet cihazınızın üreticisiyle iletişime geçin.

- Diyabet cihazını, cihazla birlikte gönderilen kabloyu kullanarak bilgisayara bağladıktan sonra cihazınız Glooko Uploader'ı kullanarak verileri yüklemeye başlayacaktır.
- Herhangi bir hatayla karşılaşırsanız lütfen hatayı çözmek için ekrandaki talimatları izleyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz yardım almak için lütfen Glooko Destek ile iletişime geçin.

**NOT:** Cihazınızdan ilk kez veri yüklerken kullanıcı hesabınızı doğrulamanız istenebilir. İstendiğinde yüklemeyi tamamlamak ve cihazı hesabınıza atamak için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

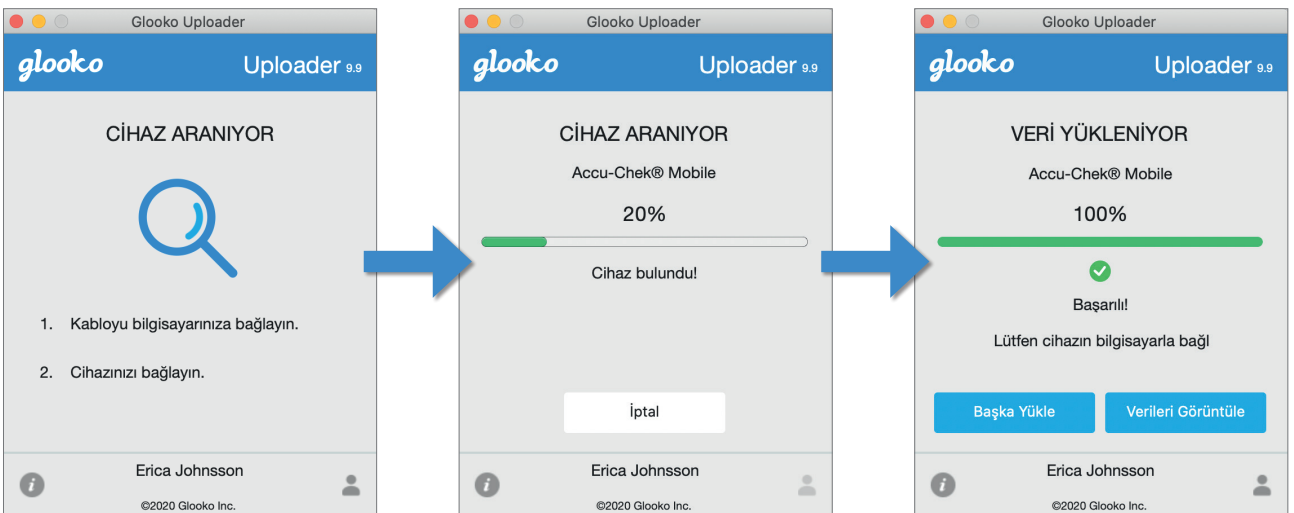


# Hastalar ve Saęlık alıřanları

## 8 Diyabet verilerini grntleyin


Diyabet cihazı verilerinizi Glooko Uploader'ı kullanarak ykledikten sonra <https://my.glooko.com> adresinde Glooko hesabınıza giriř yaparak verileri grebilirsiniz.

- **Hastalar:**  
MyGlooko Web Paneli hakkında daha fazla bilgi almak iin ltfen <https://support.glooko.com> adresinde [Kiřisel Kullanım iin - Hızlı Bařlangı Kılavuzu](#) belgesine gz atın.
- **Saęlık alıřanları:**  
Toplu Takip Aracı hakkında daha fazla bilgi almak iin ltfen řu belgeye gz atın: <https://support.glooko.com> adresinde [Klinikler iin Glooko - Hızlı Bařlangı Kılavuzu](#).

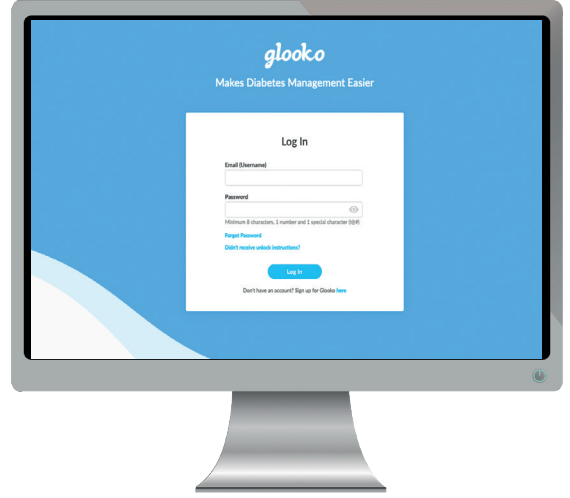


# Uyumlu cihazlar ve aktarım yöntemleri


Diasend® Uploader'ı kullanarak diyabet verilerini Glooko'ya yükleme konusundaki talimatları aşağıda bulabilirsiniz. Belirli bir cihaz için kesin yükleme talimatları sunulmadığı sürece cihazı kendi USB kabloyla PC veya Mac'e bağlamanız yeterlidir. Ardından yükleme otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

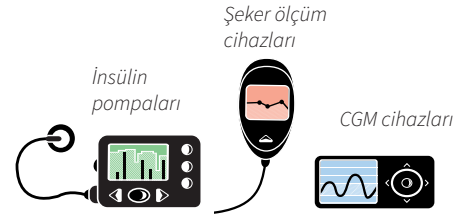

## Kan şekeri ölçüm cihazları - USB kabloyla bağlı

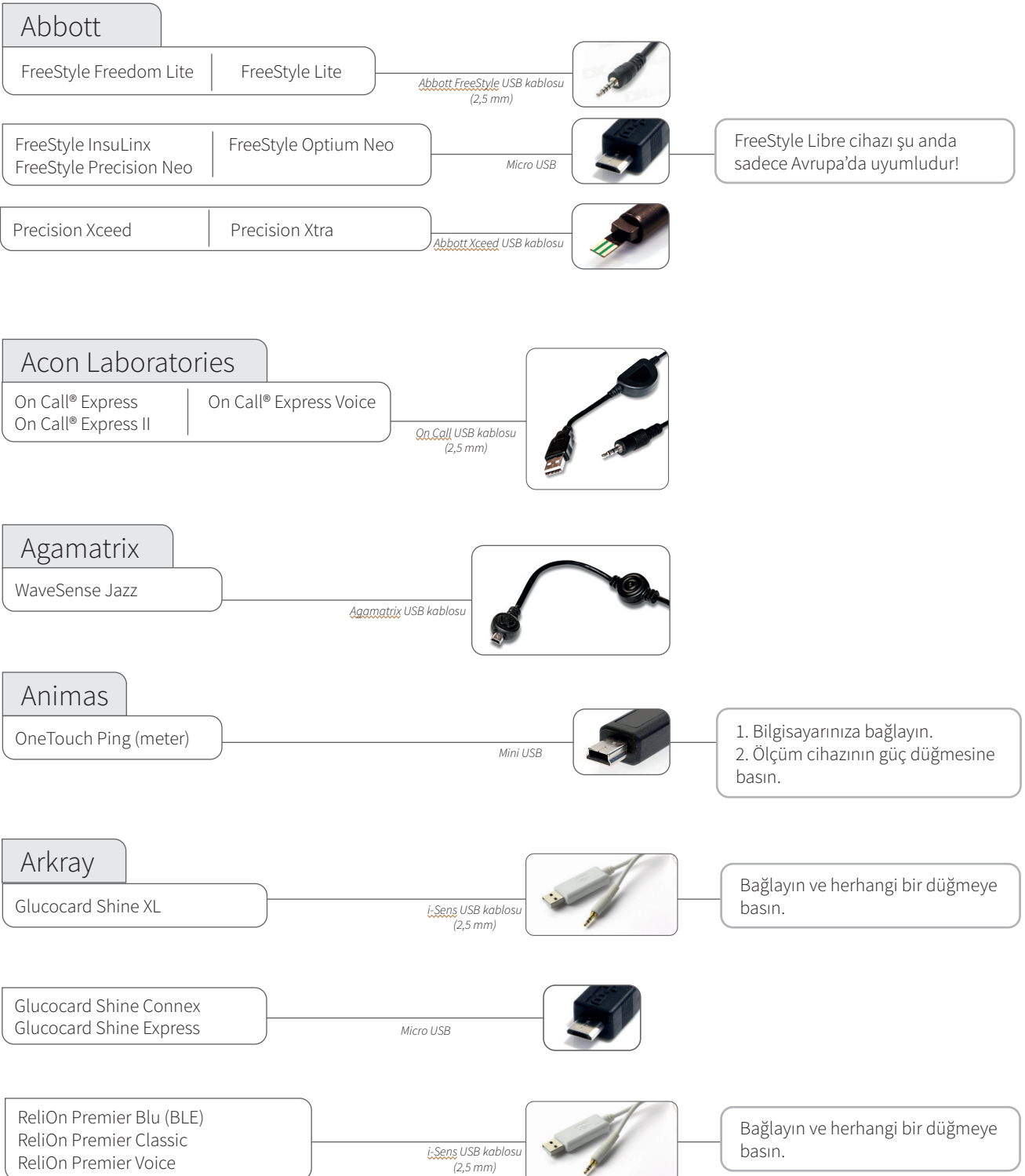

# Kan şekeri ölçüm cihazları - USB kablosuyla bağlı

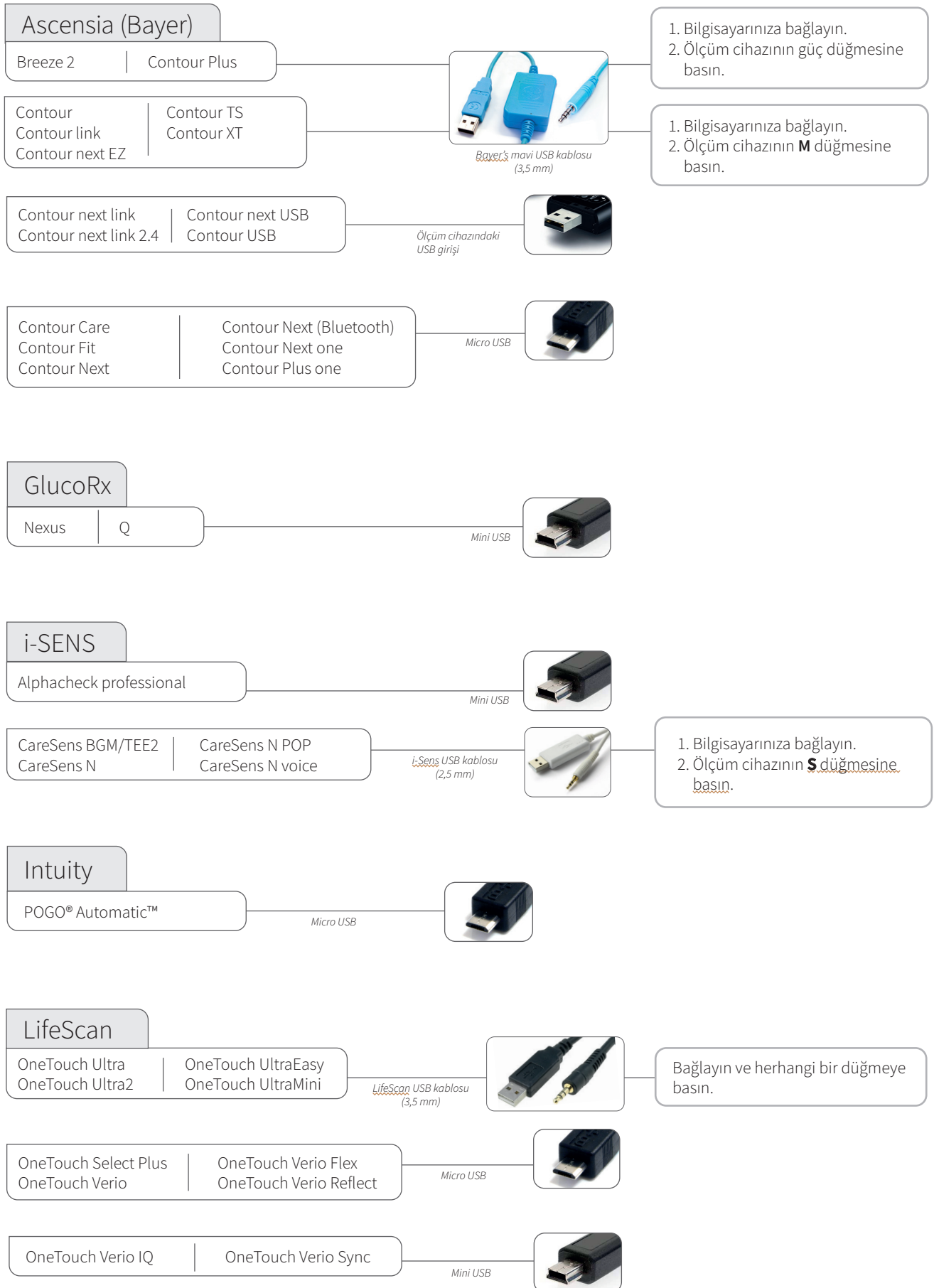

## Kan şekeri ölçüm cihazları - USB kablosuyla bağlı

### Menarini

Glucomen LX2

Menarini mavi USB kablosu (3,5 mm)



Ölçüm cihazında **E-3** yazısı görüntüleniyorsa cihazın bağlantısını kesin, ekran kapanana kadar bekleyin ve cihazı tekrar bağlayın.

### Trividia (Nipro)

TRUEresult  
TRUE METRIX

TRUE METRIX AIR  
TRUEyou mini

Nipro dock USB kablosu



Bağlayın ve ölçüm cihazını yerleştirme istasyonuna yerleştirin.

### Prodigy

AutoCode

Mini USB



### Roche Accu-Chek

Active  
Aviva Connect  
Guide

Guide Me  
Instant  
Mobile (USB)

Micro USB



1. Bilgisayarınıza bağlayın.
2. Yükleme işlemi kablo bağlandıktan sonra 20 saniye içinde başlayacaktır. Bağlantı kurulmadıysa ölçüm cihazının ana menüsüne gidin. Sırayla **Verilerim > PC analizi > Veri Aktarımı** seçeneklerine gidin ve ölçüm cihazını USB kablosuna tekrar bağlayın. (Lütfen iki ok düğmesini basılı tutmayın).

### Sanofi

BGStar

Sanofi USB kablosu



## Kan şekeri ölçüm cihazları - kızılötesi bağlantıyla bağlı



### Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano  
Accu-Chek Aviva Plus Black  
Accu-Chek Aviva Plus Silver  
Accu-Chek Nano  
Accu-Chek Performa  
Accu-Chek Performa Nano



ACTISYS Li, Li2 veya Accu-Chek 360°

1. Kızılötesi kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.
2. Ölçüm cihazı kapalıyken iki ok düğmesine ekranda iki ok görüntülenene kadar basılı tutarak kızılötesi aktarımı etkinleştirin.

Accu-Chek Compact Plus



ACTISYS Li, Li2 veya Accu-Chek 360°

1. Kızılötesi kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.
2. Ölçüm cihazı kapalıyken ekranın altındaki **S** ve **M** düğmelerine ekranda iki ok görüntülenene kadar basılı tutarak kızılötesi aktarımı etkinleştirin.

Accu-Chek Aviva Combo  
Accu-Chek Aviva Expert



ACTISYS Li, Li2 veya Accu-Chek 360°

1. Kızılötesi kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.
2. Ana menüde **Verilerim** bölümüne gidin ve **Veri aktarımı** seçeneğini belirleyin.



## CGM'ler - USB kablosuyla bađlı

**Dexcom**

G4 Platinum  
G4 Platinum with Share  
G5  
Touchscreen Receiver (G5)

Micro USB

Yükleme başlamazsa alıcıyı çıkarın ve menüde **Kapat** seçeneđini belirleyerek alıcıyı kapatın. Alıcıyı geri açın ve bilgisayara bađlayın.

## İnsülin pompaları - kızılötesi bađlantıyla bađlı

**Animas (IR)**

OneTouch Ping  
Vibe

*ACTiSYS Li veya Li2  
Not! Windows 8 veya 10 kullanıcısıysanız  
ACTiSYS Li2 kablosunu kullanmanız gerekir.*

1. Pompayı askıya alın. (ANA MENÜ, **Ask.al/Sürdür** bölümüne inin ve **Tamam** düđmesine basın; **Askıya Al** seçeneđi vurgulanır).
2. **Tamam** düđmesine basın.
3. Pompayı arkası Actisys kızılötesi kablosuz indirme kablosuna bakacak şekilde yerleřtirin.
4. Aktarım tamamlandıktan sonra: Pompayı yeniden bařlatın (ANA MENÜ, **Ask.al/Sürdür** bölümüne inin ve **Tamam** düđmesine basın; **Sürdür** seçeneđi vurgulanır). **Tamam** düđmesine basın.



### Uyumlu kızılötesi kablolar

**ACTiSYS - Li kablosu**



**Uyumlu işletim sistemleri:**  
macOS X: 10.14-11.0  
Windows: Geçerli deđil

**ACTiSYS - Li2 kablosu**



**Uyumlu işletim sistemleri:**  
macOS X: 10.14-11.0  
Windows: 8, 10

**Accu-Chek - 360° kablosu (Realtyme)**



**Uyumlu işletim sistemleri:**  
macOS X: 10.14-11.0  
Windows: 8, 10

**Roche Accu-Chek Smart Pix 2 kablosu**




**Uyumlu işletim sistemleri:**  
macOS X: 10.14-11.0  
Windows: 8, 10



### Eksik bir kablonuz mu var?

Lütfen ilgili diyabet cihazınızın üreticisiyle iletişime geçin.

# İnsülin pompaları - USB kablosuyla bağlı

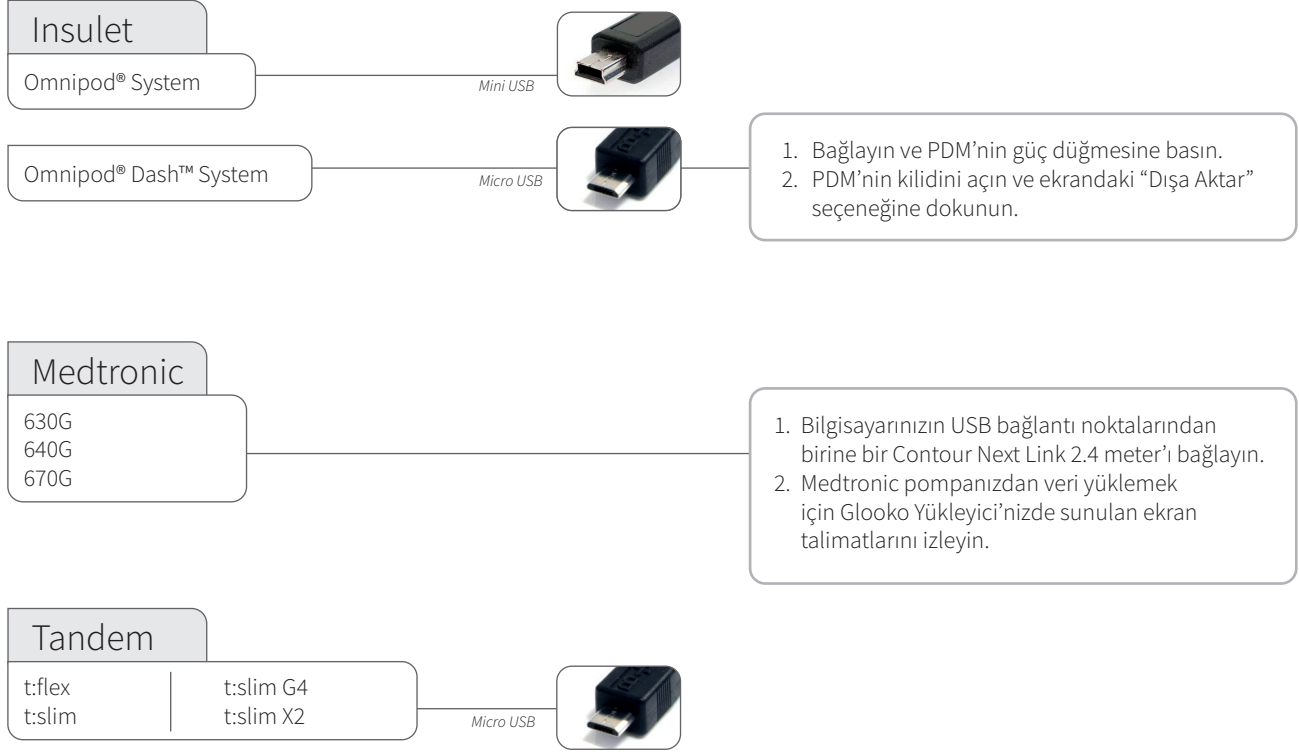

# İnsülin pompaları - kızılötesi kablolarla bağlı

Uyumlu kızılötesi kablolar


Roche Accu-Chek  
Smart Pix kablosu



Roche Accu-Chek  
Smart Pix 2 kablosu



Roche  
Accu-Chek Aviva Insight  
Accu-Chek Performa Insight

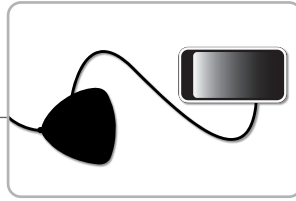

**Smart Pix 2**  
Not! Pompanızın el aygıtını bir mikro USB kablosuyla Smart Pix 2ye bağlayın.

1. Smart Pix 2 kablosunu senin bilgisayarın bağlayın ve Smart Pix 2nin üstündeki mavi göstergenin yavaşça yanıp sönmelerini bekleyin.
2. El aygıtını bir mikro USB kablosuyla Smart Pix 2ye bağlayın.
3. El aygıtının menüsünde **PC'ye Bağlan** seçeneğini belirleyin ve **Tamam**'a basın.
4. Pompanın el aygıtının erişim kapsamında olduğundan emin olun.
5. Smart Pix 2nin üstündeki mavi gösterge, veriler cihazdan Smart Pix 2ye aktarılırken açık olacaktır.
6. Mavi gösterge kendini kapatır ve hem Smart Pix 2den hem de cihazdan, verilerin Smart Pix 2 cihazından Glooko Uploadera aktarılması işleminin tamamlandığını belirten sesli bir sinyal verilir. Smart Pix 2 cihazının bağlantısını hemen kesmeyin!
7. Glooko Uploaderin yüklemenin başarılı olduğunu onaylamasını bekleyin.

CE



Glooko Inc  
411 High Street  
Palo Alto, CA 94301  
USA



Glooko AB  
Nellickevägen 20  
SE-412 63 Göteborg  
SWEDEN

Destek  
[help@glooko.com](mailto:help@glooko.com)  
<https://support.glooko.com>

[www.glooko.com](http://www.glooko.com) © 2021 Glooko Inc.

A2044v25D IFU\_TR\_glooko\_uploader (2021-06-29)

IFU-0039-25-TR Rev 04

**glooko**<sup>®</sup>  
BETTER TOGETHER