


PLUMAS DE INSULINA INTELIGENTES: NovoPen® 6 y NovoPen Echo® Plus Cómo cargar datos con Glooko®

1. Necesitará un smartphone compatible con un chip con comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) para cargar datos desde una pluma de insulina inteligente.
2. Inicie Glooko® Mobile App e inicie sesión. La aplicación está disponible en la [App Store](#) (iOS) y en [Google Play](#) (Android).
3. Asegúrese de que el botón de dosis de la pluma esté presionado hasta el final y que el contador de dosis esté en cero.

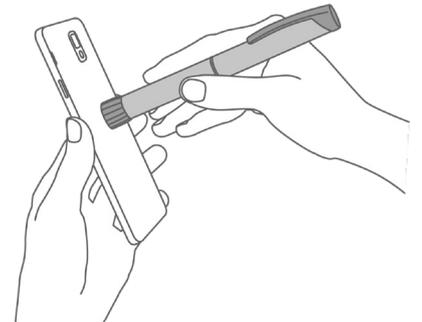

4.

(nuevo usuario de Glooko) (usuario existente de Glooko) (primera conexión del dispositivo) (después de conectar el dispositivo)

En la pestaña Inicio, haga clic en "Sincronización" en la esquina superior derecha.

Si conecta su dispositivo por primera vez, haga clic en "Agregar nuevo dispositivo" y seleccione "Plumas inteligentes".

Si ya conectó su dispositivo, pulse el dispositivo que sea cargar.

5. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la carga.
6. Después de realizar la carga correctamente, podrá ver los datos de su insulina en una variedad de gráficos e informes.

CÓMO ENCONTRAR EL CHIP NFC EN SU TELÉFONO

Normalmente, el chip NFC está instalado en el centro de la parte posterior del teléfono, pero esto puede variar entre diferentes modelos. Comuníquese con el fabricante del teléfono celular si hay algún problema de conectividad entre la pluma y el teléfono, así como para averiguar dónde se encuentra el chip NFC en el teléfono.

NovoPen® 6 y NovoPen Echo® Plus son marcas comerciales registradas de propiedad de Novo Nordisk.