


# PLUMAS INTELIGENTES DE INSULINA: NovoPen® 6 y NovoPen Echo® Plus Cómo cargar datos con Glooko®


1. Necesitará un smartphone compatible con un chip NFC para cargar datos desde una pluma de insulina inteligente.

2. Inicie la Glooko® Mobile App e inicie sesión. La aplicación está disponible en la [App Store](#) (iOS) y [Google Play](#) (Android).

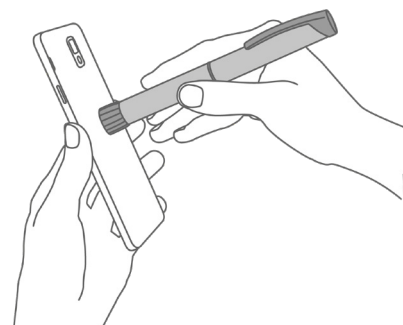

3. Asegúrese de que pulse por completo el botón de dosis de la pluma y que el contador de dosis está en cero.

4.

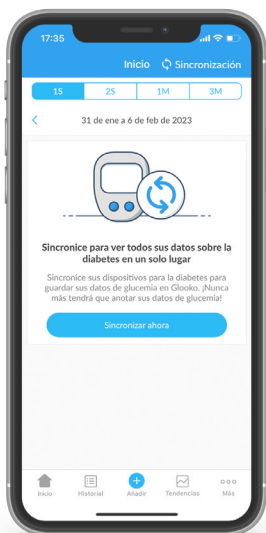


(nuevo usuario de Glooko)



(usuario existente de Glooko)



(primera conexión del dispositivo)

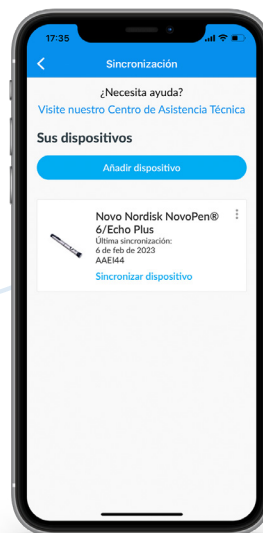

(tras conectar el dispositivo)

En la pestaña Inicio, pulse "Sincronización" en la esquina superior derecha.

Si conecta el dispositivo por primera vez, pulse "Añadir dispositivo" y seleccione "Plumas inteligentes".

Si ya ha conectado el dispositivo, seleccione el dispositivo que desea cargar.

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la carga.

6. Después de realizar la carga correctamente, puede ver sus datos de la insulina en una variedad de gráficos e informes.

## CÓMO LOCALIZAR EL CHIP NFC EN EL TELÉFONO

Normalmente, el chip NFC está instalado en el centro de la parte trasera del teléfono, pero puede variar según el modelo. Póngase en contacto con el fabricante del teléfono móvil si hay algún problema de conectividad entre la pluma y el teléfono y para averiguar dónde se encuentra el chip NFC en este.

NovoPen® 6 y NovoPen Echo® Plus son marcas registradas propiedad de Novo Nordisk.

**glooko**  
BETTER TOGETHER