


SMARTE INSULINPENNER: NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus Slik laster du opp data med Glooko®

1. Du trenger en kompatibel smarttelefon med en NFC-chip for å kunne laste opp data fra en smart insulinpenn.

2. Start Glooko® Mobile App og logg inn. Appen er tilgjengelig på [App Store](#) (iOS) og [Google Play](#) (Android).

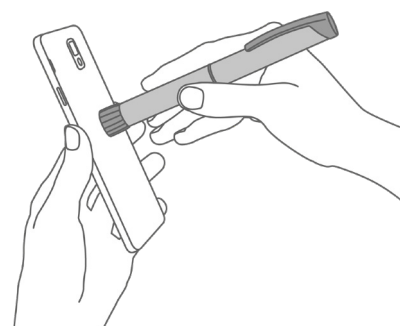

3. Sørg for at pennens doseknapp er trykket helt inn, og at dosetelleren står på null.

4.

(ny Glooko-bruker) (eksisterende Glooko-bruker) (første gang enheten kobles til) (etter at enheten er koblet til)

Trykk på «Synkroniser» øverst i høyre hjørne i Hjem-fanen.

Hvis det er første gang du kobler til enheten din klikker du på «Legg til ny enhet» øverst til høyre, og velger «Smartpennner». Hvis du allerede har koblet til enheten din, velger du «Synkroniser» ved siden av enheten du ønsker å laste opp.

5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opplastingen.

6. Etter vellykket opplasting kan du se insulindataene dine i en rekke diagrammer og rapporter.

SLIK FINNER DU NFC-CHIPEN PÅ MOBILEN DIN

Vanligvis er NFC-chipen festet midt bak på telefonen, men dette kan variere fra modell til modell. Kontakt mobilprodusenten hvis det oppstår tilkoblingsproblemer mellom pennen og telefonen, og for å finne ut hvor NFC-chipen er plassert på telefonen.

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus er registrerte varemerker som tilhører Novo Nordisk.

glooko
BETTER TOGETHER

MKTG-0049-NO-no 01