


# SMARTA INSULIN-PENNOR

## NovoPen® och NovoPen Echo® Plus

### Hur man laddar upp data med Glooko®

1. Du behöver en kompatibel smarttelefon med ett NFC-chip för att ladda upp data från en smart insulinpenna.
2. Starta Glooko® Mobile App och logga in. Appen finns i [App Store](#) (iOS) och [Google Play](#) (Android).
3. Se till att pennans doseringsknapp är helt intryckt och att doseringsräknaren är nollställd.

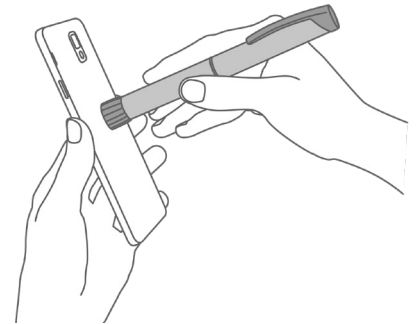

4. 

(ny Glooko-användare)      (befintlig Glooko-användare)      (första anslutning av en enhet)      (när enheten har anslutits)

Klicka på 'Synk' på Hem-fliken i övre högra hörnet.

Om det är första gången du ansluter din enhet klickar du på 'Ny enhet' överst till höger och välj 'Smartpennor'. Om du redan har anslutit din enhet väljer du 'Synk' bredvid enheten som du vill ladda upp till.

5. Följ skärminstruktionerna för att slutföra uppladdningen.
6. När uppladdningen är klar kan du se dina insulindata i olika tabeller och rapporter.

#### HUR MAN HITTAR NFC-CHIPET PÅ DIN TELEFON

Vanligtvis sitter NFC-chipet mitt på telefonens baksida, men det kan variera från modell till modell. Kontakta din telefontillverkare om du har några anslutningsproblem mellan pennan och telefonen och för att ta reda på var NFC-chipet sitter på din telefon.

NovoPen® och NovoPen Echo® Plus är registrerade varumärken som ägs av Novo Nordisk.