
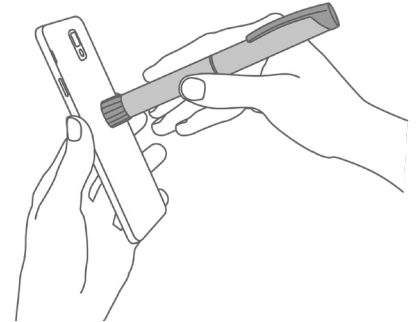


SMART INSULIN PENS: NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus Daten mit Glooko® hochladen

1. Sie benötigen ein kompatibles Smartphone mit NFC-Chip, um Daten von einem Smart Insulin Pen hochzuladen.
2. Starten Sie die Glooko® Mobile App und melden Sie sich an. Die App ist im [App Store](#) (iOS) und auf [Google Play](#) (Anroid) verfügbar.
3. Stellen Sie sicher, dass der Dosierknopf des Pens vollständig gedrückt ist, und die Dosisanzeige auf Null steht.

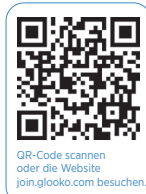

4.

(neuer Glooko-Benutzer)

(bestehender Glooko-Benutzer)

(Gerät wird zum ersten Mal verbunden)

(nachdem das Gerät verbunden wurde)

Klicken Sie in der Registerkarte „Startseite“ auf „Synchronisieren“ in der oberen rechten Ecke.

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verbinden, klicken Sie oben rechts auf „Neues Gerät“ und wählen Sie „Smart Pens“. Wenn Sie Ihr Gerät bereits verbunden haben, wählen Sie „Synchronisieren“ neben dem Gerät, das Sie hochladen möchten.

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Hochladen abzuschließen.
6. Nach erfolgreichem Hochladen können Sie Ihre Insulindaten in einer Vielzahl von Diagrammen und Berichten anzeigen.

SO FINDEN SIE DEN NFC-CHIP AN IHREM TELEFON

Normalerweise befindet sich der NFC-Chip in der Mitte der Rückseite des Telefons, dies kann jedoch zwischen verschiedenen Modellen variieren. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller des Mobiltelefons, wenn es Verbindungsprobleme zwischen dem Pen und dem Telefon gibt, und um herauszufinden, wo sich der NFC-Chip an Ihrem Telefon befindet.

NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus sind eingetragene Markenzeichen von Novo Nordisk.